


GEBRUIKSAANWIJZING AVALO/ARTROMICK ACS MEDICIJNWAGEN

WIJZIGEN CODE VAN ELECTRONISCH CIJFERSLOT





Het cijferslot bestaat uit vijf cijfertoetsen, drie programma toetsen, drie controle lampjes en een sluitknop

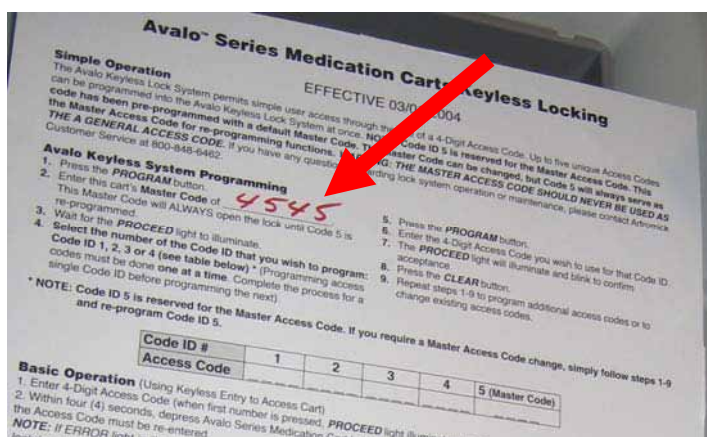

Bij iedere medicijnwagen wordt een sheet met informatie geleverd. Op deze sheet staat de master code van de wagen vermeld (rode letters '4545' op de foto)



Toets de 'Program' toets op het display van de wagen.



**Toets de gegeven
Master Code in
middels de cijfer
toetsen op het
display.**



**Het 'Proceed'
controle lampje gaat
knipperen. Wacht tot
dit lampje uit gaat.**



**Per wagen kunnen
vier codes worden
ingesteld.
Toets het nummer in
de serie van codes
welke aangepast
moet worden
(bijvoorbeeld code 1
is nu '1234' en moet
'4321' worden:
toets dan bij deze
stap '1').**




Toets de 'Program' toets



**Toets de nieuw
gewenste cijfercode
in op het display.**



**Het 'Proceed' lampje
gaat branden. Wacht
tot dit lampje uit
gaat.**

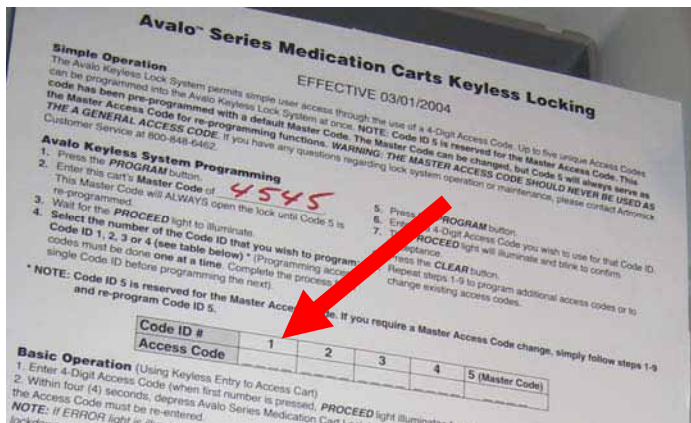

Schrijf de nieuwe code op in het daarvoor bestemde vakje op de bijgeleverde kaart.



Toets de 'Clear' toets op het display.



De code is succesvol aangepast.